

Oídos secos
Dry ears
dryotix

156355.2

dryotix

Oídos secos
Dry ears



Seca y elimina el exceso
de humedad en el oído

Previene la aparición de
infecciones en el oído

DIFUSOR ERGONÓMICO
CÓMODO Y FÁCIL

RE:VA
Health



Producto sanitario

dryotix

Oídos secos
Dry ears

- Para secar y eliminar el exceso de humedad del oído.
- Previene la infección del oído.
- Seguro y eficaz en las condiciones de uso.
- Fácil de usar.
- Dispersión óptima.
- Clínicamente testado.

30ml

Distribuido por:

Reva Health Europe S.L.
Pl. Ausiàs March 1, 4º 6º
08195 Sant Cugat del Vallès
ESPAÑA
info@reva-health.com

Representante
autorizado:

Obelis S.A.
53 Boulevard Général Wahis
1030 Brussels, Belgium



FABRICADO POR:

Lab. Naveh Pharma Ltd.
POB 8139 Natanya 42505
Israel

156355.2

dryotix

Oídos secos
Dry ears



Seca y elimina el exceso
de humedad en el oído

Previene la aparición de
infecciones en el oído

DIFUSOR ERGONÓMICO
CÓMODO Y FÁCIL

RE:VA
Health



dryotix

Oídos secos
Dry ears

Ingredientes:

Alcohol isopropílico, Glicerina
y Aceite de Rosas.

INSTRUCCIONES DE USO:

Después de una actividad en el agua, aplicar 1-2 pulverizaciones en el oído. Tras su aplicación, en 2 ó 3 minutos, se producirá la completa evaporación del agua o humedad atrapada en el oído externo.

ADVERTENCIAS:

No utilizar en caso de perforación de la membrana del tímpano.

No aplicar el spray en los ojos. Mantener fuera del alcance de los niños.

SIN CONSERVANTES
SIN GAS

SOLO PARA USO EXTERNO.

LOT Lote:

Cad.: Cad.

