

# otowel ACQUA

Spray nebulizador

**Para secagem da água  
e da humidade no canal auditivo**

**Otowel Acqua** é um produto exsicante para a eliminação da água e da humidade do canal auditivo, formulado para aliviar o desconforto do ouvido causado pela água que ficou retida após atividade aquática.

**Otowel Acqua** previne os efeitos nocivos resultantes da dor e de infeções bacterianas ou fúngicas.

**Otowel Acqua** combina a sua fórmula exclusiva a um spray nebulizador patenteado.

**Quando se deve usar Otowel Acqua?**

Após atividades aquáticas como natação, mergulho, banho, duche, etc.

**Como é que Otowel Acqua funciona?**

A fórmula de Otowel Acqua spray nebulizador tem características físico-químicas especiais que quando em contacto com a água são ativadas, provocando a completa evaporação da água e a eliminação da humidade do canal auditivo. O mecanismo em micro-spray permite uma dispersão ideal de **Otowel Acqua** no ouvido, com resultados imediatos.

**Ingredientes:**

Álcool Isopropílico, Glicerina, Óleo de Rosas.

 **Instruções de uso:**

Aplicar 1 a 2 nebulizações no ouvido afetado. A evaporação completa da água ou humidade retida no canal externo ocorre cerca de 2 a 3 minutos após nebulização. Se necessário, repetir a nebulização.

 **Advertências:**

Não deve ser usado em casos de tímpano perfurado; Manter longe da vista e do alcance das crianças; Evitar contacto com os olhos; No caso de contacto com os olhos, enxaguar imediatamente com água em abundância e procurar ajuda médica; Manter longe de fontes de ignição - não fumar;

 **Altamente inflamável.**

**Apenas para uso externo.**

**Condições de armazenamento:**

Armazenar em lugar fresco, não expor a temperatura acima de 50°C. Não colocar no fogo após utilização.



Naveh Pharma (1996) Ltd.  
P.O.B. 8139, Netanya 4250519, Israel  
[www.navehpharma.com](http://www.navehpharma.com)

Última revisão: 10/2018

EC REP

Obelis S.A.  
Bd. Général Wahis 53,  
1030 Brussels, Belgium

**DISTRIBUÍDO POR:**

Tecnifar S.A.  
Rua José da Costa Pedreira, N°11-B - Torre Sul  
1750-130 Lisboa

**Dispositivo Médico  
Classe I**

