

11/2021

DEA4318

Spray nebulizador
Para secagem da água
e da humidade no canal auditivo

otowel
ACQUA

otowel
ACQUA

Spray nebulizador

Para secagem da água
e da humidade no canal auditivo



Otowel Acqua
Spray nebulizador

Para secagem da água e da
humidade no canal auditivo

Previne a infeção do ouvido;
Alivia o desconforto do ouvido;
Remove, em minutos,
o excesso de humidade;
Fácil utilização; Testado
cl clinicamente; Dispersão ideal;
Sem conservantes;
Seguro e eficaz.

Ingredientes:

Álcool Isopropílico, Glicerina,
Óleo de Rosas.



Naveh Pharma (1996) Ltd.
P.O.B. 8139, Netanya 4250519, Israel
www.navehpharma.com

EC REP

Obelis S.A.
Bd. Général Wahis 53,
1030 Brussels,
Belgium

DISTRIBUÍDO POR:

Tecnifar S.A.
Rua José da Costa Pedreira, Nº 11-B - Torre Sul
1750-130 Lisboa, Portugal

otowel
ACQUA

Spray nebulizador

Para secagem da água
e da humidade no canal auditivo



Instruções de uso:

Após a atividade aquática,
aplicar 1 a 2 nebulizações no
ouvido afetado. A evaporação
completa da água ou humidade
retida no canal externo ocorre
cerca de 2 a 3 minutos após
nebulização.

Advertências:

Não deve ser usado em casos
de tímpano perfurado; Manter
longe da vista e do alcance das
crianças; Evitar contacto com
os olhos; No caso de contacto
com os olhos, enxaguar
imediatamente com água em
abundância e procurar ajuda
médica; Manter longe de fontes
de ignição - não fumar;

Altamente inflamável.

Apenas para uso externo.

**Condições de
armazenamento:**

Armazenar em lugar fresco,
não expor a temperatura
acima de 50°C. Não colocar
no fogo após utilização.

Dispositivo Médico
Classe I



30ml e



11/2021

LOT DEA4318



6304899

Spray nebulizador
Para secagem da água
e da humidade no canal auditivo

ACQUA

2

5/11/2018 - otowel acqua 30 mL Vers. III - 11/2018