

# ANAURETTE

Spray

Scioglie il tappo di cerume e ne **previene** la formazione

- PER LA RIMOZIONE DEL CERUME DALLE ORECCHIE
- DUPLICE AZIONE: SCIOLGIE IL TAPPO DI CERUME E LO RIMUOVE
- PREVIENE LA FORMAZIONE DEL TAPPO DI CERUME
- È INDICATO NEI NEONATI AL DI SOPRA DEI 3 MESI
- DI FACILE UTILIZZO
- CLINICAMENTE TESTATO
- SENZA CONSERVANTI

**Ingredienti:**

Paraffina liquida leggera, Fitosqualano, Olio essenziale di menta.

**Istruzioni per l'uso:**

- 1-2 spruzzi in ciascun orecchio 3 volte al giorno fino alla dissoluzione del tappo di cerume.
- 1-2 spruzzi in ciascun orecchio una volta al giorno per prevenire la formazione dei tappi di cerume.

Il prodotto può essere usato in neonati al di sopra dei 3 mesi, bambini e adulti.

**Avvertenze:**

- **Anaurette** non deve essere usato in pazienti con timpano perforato
- Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini
- Non spruzzare negli occhi

**Condizioni di conservazione:** conservare in luogo fresco, non esporre a temperature superiori a 50°C.

**USO ESTERNO**

Dispositivo medico

# ANAURETTE

Spray

Scioglie il tappo di cerume e ne **previene** la formazione

spray

# ANAURETTE



Scioglie il tappo di cerume e ne **previene** la formazione 30ml

Naveh Pharma Ltd.  
P.O.B. 8139, Netanya 42505, Israël

**Rappresentante Europeo Autorizzato:**  
OBELIS S.A.  
Bd. Général Wahis 53  
1030 Brussels - Belgium

**Distributore:**  
Zambon Italia S.r.l.  
Via Lillo del Duca 10,  
20091 Bresso (MI)  
www.zambon.it

ZIT30CE0348



ANAURETTE.AS.A.01  
45x45x115

