

FONIX®

HIGIENA USZU



FONIX®


HIGIENA USZU

wyrób medyczny

**Do usuwania
woskowiny
z USZU**

Woskowina lub cerumen jest normalną wydzieliną gruczołów w uchu. Jednak nadmierne wydzielanie woskowiny może powodować szereg efektów niepożądanych takich, jak dyskomfort, ból i kaszel, z utratą słuchu włącznie.

Ubytek słuchu występuje, gdy w przewodzie słuchowym odłoży się zbyt duża ilość woskowiny (bloki). Wówczas zmniejsza się lub blokuje całkowicie poziom fal dźwiękowych, które docierają do błony bębenkowej.

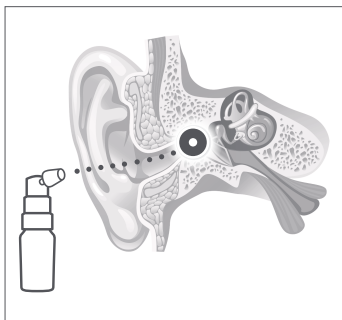

Dyskomfort lub ból mogą być odczuwane w przypadku zbyt dużego nacisku woskowiny na błonę bębenkową.

Kaszel może wystąpić, gdy zbyt duża ilość woskowiny pobudza nerwy wspólne kanału słuchowego i gardła, powodując łaskotanie w gardle, które może wywoływać kaszel.

Wyrób medyczny **Fonix® Higiena Uszu** jest skutecznym, bezpiecznym i naturalnym sprayem przeznaczonym do rozpuszczenia i usuwania zgromadzonej woskowiny.

Fonix® Higiena Uszu łączy mechaniczne oczyszczanie z bezpieczeństwem i skutecznością naturalnej oliwy z oliwek. Podczas stosowania **Fonix® Higiena Uszu** woskownina rozpuszcza się i stopniowo jest usuwana z ucha dzięki naturalnym mechanizmom oczyszczania ucha. Mechanizm rozpylania **Fonix® Higiena Uszu** zapewnia doskonałe rozproszenie w kanale słuchowym.

Skład: olej mineralny, Olivaxol™ (fitoskwalan), olejek miętowy.

Wskazania do stosowania:

Stosować w celu rozpuszczenia i usunięcia woskowiny zalegającej w przewodzie słuchowym. Przeznaczony dla niemowląt powyżej 3. miesiąca życia, dzieci oraz dorosłych.

Ostrzeżenia:

- Nie stosować w przypadku perforacji błony bębenkowej.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie stosować do oczu.

Sposób użycia: Stosować 1-2 dawki 3 razy dziennie do każdego ucha aż do rozpuszczenia woskowiny. W trudnych przypadkach rozpylać wprost do kanału słuchowego pociągając górny płatek ucha lekko w górę i w kierunku tyłu głowy. Ten manewr umożliwia wnikanie składników czynnych do wewnętrznych części kanału słuchowego.

DO UŻYTKU ZEWNĘTRZNEGO


Warunki przechowywania:

Przechowywać w chłodnym miejscu. Nie narażać na działanie temperatury powyżej 50°C.


Postępowanie z pustym pojemnikiem:

Opakowania **Fonix® Higiena Uszu** nie wymagają szczególnej utylizacji. Nie ma konieczności specjalnego przechowywania, etykietowania lub niszczenia. Dbając o środowisko opakowania metalowe należy wyrzucać do przeznaczonych do tego pojemników.

Nie stosować wyrobu medycznego po

upływie terminu ważności () zamieszczonego na butelce i tekturowym pudełku.

Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić do Producenta i do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
www.urpl.gov.pl

Producent:
 **Naveh-Pharma LTD.**
19, Yad-Harutzim St., Netanya,
4250519 Izrael

www.navehpharma.com

 EC REP



Autoryzowany przedstawiciel w UE:
OBELIS S.A. 53 Boulevard
Général Wahis 1030 Brussels, Belgia


 **polpharma**

Importer: Zakłady Farmaceutyczne
POLPHARMA S.A.
ul. Pelplińska 19
83-200 Starogard Gdański, Polska

Znaczenie zastosowanych symboli:

  Należy zapoznać się z instrukcją użytkowania.


 Użyć do: (termin ważności)

 Producent

 Autoryzowany przedstawiciel w Unii Europejskiej

 Numer serii

 wyrób medyczny

Material/ Material:	ULOTKA INFORMACYJNA/ LEAFLET:		
Wzór/ Artwork:	ULT-006207_2		
Preparat/ Product:	Fonix Higiena Uszu 30 ml		
Adnotacje/ Annotations:	Rozmiar ulotki/ Leaflet size: 105 x 145 mm		
Kolorystyka/ Colours:	 P Cool Gray 11	Opracował/ Prepared by:	1.07.2021 T. Parol